

SO WENDEN SIE PekoBelt RICHTIG AN

Gebrauchsanweisung

Verwenden Sie PekoBelt Pflaster mit Bedacht!

PekoBelt ist diskret. Das PekoBelt Pflaster muss sorgfältig angebracht werden, um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten. Die Haftfähigkeit - und damit die Wasserundurchlässigkeit - kann durch mangelhafte Vorbereitung stark beeinträchtigt werden. (Denken Sie an Kondome, die ebenfalls Kenntnisse erfordern, wie sie richtig und sicher verwendet werden.)

Wichtig! Bitte...

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen!

Bereiten Sie die Haut für das Anbringen des Pflasters vor!

Die Haut, auf die das Pflaster aufgeklebt wird, sollte sauber, trocken und gesund sein.

Eine vollständige Haarentfernung ist unerlässlich. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung!

PekoBelt ist ein Hygienepflaster, das die äußeren weiblichen Genitalien nach außen hin dicht abschließt und so vor Infektionen im weiblichen Genitalbereich schützt, die bei normalen Aktivitäten im Schwimmbad, im Freiwasser, in der Sauna, im Solarium sowie bei Fitness-Aktivitäten und sportlichen Aktivitäten im oder auf dem nassen Element auftreten.

Während der Menstruation gibt die Verwendung des Pflasters nach dem Einführen eines Tampons ein Gefühl hygienischer Sicherheit.

Inhalt: Die Packung enthält 5 Pflaster.

Gegenanzeigen: Bekannte allergische Reaktion auf Inhaltsstoffe herkömmlicher Pflaster.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bis zur Verwendung bei Raumtemperatur (zwischen 4 und 30 °C) an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verwenden Sie das PekoBelt Pflaster nicht nach dem auf der Einzelpackung angegebenen Verfallsdatum!
- Das PekoBelt Pflaster ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie nicht mehr als fünf Pflaster hintereinander!
- Bei der Verwendung in der Sauna sollten Sie sich mit dem Pflaster auf ein Handtuch setzen oder legen, um Hautirritationen zu vermeiden!

Vorbereitung des zu schützenden Areals und seiner Umgebung

Das PekoBelt Pflaster bedeckt den weiblichen Genitalbereich vom Schambein bis zum Damm, lässt aber den Anus frei (Abbildung 7).

- Der äußere Genitalbereich sollte mit einem Waschgel oder einem anderen Reinigungsmittel gemäß den grundlegenden Hygieneregeln gereinigt und vollständig abgespült werden!
- Trocknen Sie den Schamhügel und den Genitalbereich ab!
- Im Genitalbereich ist je nach Anwendungsareal des Schwimmbad-Pflasters eine Haarentfernung (Rasieren, Wachsen) notwendig, da die Haare die Haftfähigkeit des Pflasters stark beeinträchtigen. Die Verwendung von chemischen Enthaarungsmitteln in diesem Bereich wird nicht empfohlen.

Verwendung

Da das PekoBelt Pflaster auch den weiblichen Harnröhrenausgang bedeckt, wird empfohlen, die Blase unmittelbar vor dem Aufbringen des Pflasters zu entleeren.

Sollte es während der Anwendung zu Harndrang kommen, entfernen Sie das gesamte Pflaster und bringen Sie ein neues Pflaster auf den abgetrockneten Genitalbereich auf, nachdem die Blase entleert wurde!

Das PekoBelt Pflaster ist unter normalen Bedingungen für eine ununterbrochene Anwendung über einen Zeitraum von weniger als 60 Minuten bestimmt.

Anbringen des Pflasters



1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Pflaster. Ziehen Sie die Unterseite des Schutzpapiers von der Rückseite des Pflasters ab, um die Klebefläche freizulegen (Abbildung 1).



2. Legen Sie das Pflaster wie in Abbildung 2 gezeigt in Ihre Handfläche, so dass das Ende Ihres Mittelfingers nicht vom Pflaster bedeckt ist. Achten Sie darauf, dass die freigelegte Klebefläche dabei nicht zerknittert wird.




3. Die ideale Haltung zum Anbringen des Pflasters ist in Abbildung 3 dargestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Pflaster spannungsfrei aufgebracht wird und sich bei verschiedenen sportlichen Bewegungen nicht von der Hautoberfläche löst.

Drehen Sie das Pflaster in der Handfläche in Richtung Genitalbereich und berühren Sie den Anus mit dem freien Mittelfinger. Streichen Sie dann das Pflaster zuerst mit dem Mittelfinger, dann mit Zeige- und Ringfinger bläschenfrei auf der Haut glatt.




4. Ziehen Sie die Oberseite des Schutzpapiers mit einer Hand von der Rückseite des Pflasters ab und streichen Sie das Pflaster mit der anderen Hand bläschenfrei auf der Haut glatt. (Abbildung 4)

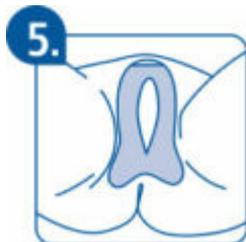

5. Das Pflaster befindet sich in der richtigen Position, wenn sein unterer Pol am Perineum (dem Bereich zwischen dem unteren Pol der Vagina und dem oberen Pol des Anus) und an der gesamten Oberfläche des äußeren Genitalbereichs und seiner Umgebung spannungsfrei haftet (Abbildung 5). Drücken Sie das Pflaster nun fest auf die gesamte Hautfläche.



6. In dieser Position ist das PekoBelt Pflaster noch mit einer Plastikfolie bedeckt. Greifen Sie den oberen farbigen Rand der Folie und ziehen Sie ihn parallel zur Hautoberfläche nach unten (Abbildung 6). Drücken Sie das Pflaster wieder fest auf die gesamte Hautfläche.

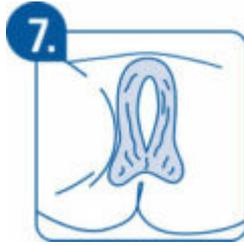

Im Idealfall haftet das PekoBelt Pflaster auf der gesamten Körperoberfläche (Abbildung 7).
Warten Sie vor dem Schwimmen 10 Minuten, damit das Pflaster die Körpertemperatur annehmen kann, um noch besser zu haften.

Entfernen des Pflasters

Drücken Sie mit dem Finger direkt auf die Haut neben dem Pflaster. Halten Sie das Pflaster am Rand fest und ziehen Sie es langsam von der Haut, parallel zur Körperoberfläche. Falls erforderlich, kann ein Pflasterlösungsmittel verwendet werden, um das Entfernen des Pflasters zu erleichtern.

Entsorgung

Werfen Sie das Schutzpapier und die Plastikfolie nach dem Aufbringen des PekoBelt Pflasters sowie das gebrauchte Pflaster separat in die dafür bestimmte Mülltonne!

Datum der Veröffentlichung der Gebrauchshinweise: 01.06.2021